

VIGTIG INFORMATION

Indretning af medicinbakker Brugsanvisning

Sæt kort med borgers navn, CPRnr, bolignr., foto mm bag den vinklede transparente frontplade.

Skriv eventuelt udvalgte data bag den vandrette del, så borgerens data også kan ses fra oven.



Sæt de transparente rumdelere ned i de dertil hørende riller. Der klemmes sammen på medicinbakkens sider, inden den sidste centimeter trykkes nedad. Derved sætter knoppen, som sidder øverst på rumdeleren, sig i spænd og holder rumdeleren på plads. **Følges denne anvisning ikke, er der stor risiko for, at riller og/eller knop knækker.**



Sæt bagstopperen med den buede kant opad bagerst i bakken. Denne sikrer, at bakken ikke trækkes helt ud og potentielt ryger på gulvet. Skal medicinbakken helt ud af medicinvognen, så kippes den opad det sidste stykke.

OBS: Medicinbakken tåler **IKKE** maskinopvask.



VIGTIGT : Ved udtræk, er det vigtigt at bakken trækkes lige ud af vognen, og at der ikke løftes op i bakken. Hvis man løfter op i bakken, så risikerer man at ødelægge ruminddelerne (klart plast)